

ERHEM *Erhem*

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WYTWÓRCA
ERHEM SP. J.
ul. Puszkińska 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



ERH 38/2

Stabilizator nadgarstka miękki



ERH 50

Stabilizator nadgarstka uniwersalny



ERH 38

Stabilizator nadgarstka



ERH 38/1

Stabilizator nadgarstka i kciuka



APARAT / ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO

www.erhem.pl

ORTOTYKA KOŃCZYN GÓRNYCH

ZASTOSOWANIE

- Urazy i uszkodzenia struktur w obrębie stawu
- Zespół cieśni nadgarstka
- Złamania kości nadgarstka
- RZS
- Przeciążenia

DZIAŁANIE

Stabilizują i unieruchamiają staw w optymalnym położeniu eliminując niepożądane ruchy nadgarstka.

WŁAŚCIWOŚCI

ERH 50

Uniwersalność stosowania na lewą i prawą kończynę.

ERH 50; ERH 38; ERH 38/1

- Możliwość zmniejszenia ilości usztywnień (szyn) w trakcie procesu usprawniania oraz indywidualnego ich dopasowania.
- Zastosowany system zapięć typu velcro oraz szyn usztywniających umożliwia precyzyjne dopasowanie i regulację stopnia unieruchomienia.
- Anatomiczny kształt szyn unieruchamiających zapewnia komfort i wygodę stosowania.
- **Szynę mocno wyprofilowaną umieszczamy od strony dłoniowej, szynę prostą od strony grzbietowej nadgarstka.**



ERH 38/2; ERH 50; ERH 38; ERH 38/1

- Stabilizator ochrania staw promieniowo-nadgarstkowy podczas powrotu do czynności zawodowych lub sportowych.
- Stabilizuje oraz aktywuje funkcjonalnie staw promieniowo-nadgarstkowy.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel

medyczny.

- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl

SKŁAD SUROWCOWY

- Trójwarstwowy materiał HIGROMED składający się z:
 - perforowanego neoprenu wywierającego na stawy lekką kompresję, zapewniającego terapeutyczne ciepło oraz trwałość i elastyczność wyrobu,
 - pianki poliuretanowej,
 - naturalnej tkaniny bawełnianej
- Szyna z tworzywa PE, szyna ze stali nierdzewnej, taśmy typu rzep-haczyk z klamkami.

KONSERWACJA

- Przed praniem usunąć elementy stabilizujące.
- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczteteczki, nie chlorować, nie piosować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

