

ERHEM *Erhem*


CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



ERH 47

Szyna na dłoń i przedramię

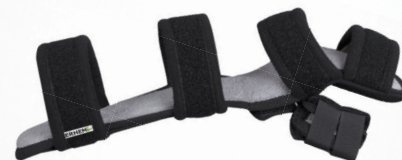

ERH 47/1

Szyna na dłoń i przedramię z odwiedzionym kciukiem

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.

ul. Puszkina 6

39-200 Dębica

Tel./Fax.: (14) 681 23 85

poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany



www.erhem.pl

APARAT / ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO

ORTOTYKA KOŃCZYN GÓRNYCH

ZASTOSOWANIE

- Urazy i uszkodzenia struktur w obrębie stawu
- Zespół cieśni nadgarstka
- Złamanie kości nadgarstka
- RZS
- Przeciążenia
- Porażenia i niedowłady wiotkie oraz spastyczne

DZIAŁANIE

Stabilizują oraz unieruchamiają staw nadgarstkowy oraz korygują ustawienie ręki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Produkty przeznaczone są zarówno dla pacjentów ortopedycznych jak i neurologicznych.
- Korekcję ustawienia ręki gwarantuje możliwość indywidualnego formowania części dłoniowej poprzez doginanie.
- Szyny przeciwdziałają konsekwencjom wiotkiego lub spastycznego ustawienia ręki neurologicznej.
- Pasy dociągowe zapewniają anatomiczne dopasowanie do obwodu kończyny oraz wysoki komfort stosowania.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmogoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.

- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl

SKŁAD SUROWCOWY

Szyna metalowa obszyta pianką poliuretanową, dwustronnie pokrytą dzianiną poliamidową z 4 pasami zapinanymi na rzepy.

KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

